

Digitales Video Otoskop/Endoskop

Universal-Set

Veterinär



Kurz-Anleitung



ZUBEHÖR



Digitales Video Otoskop/Endoskop
Inkl. Ladestation



REINIGUNG

REINIGUNG DER OPTIKEN & AUFSÄTZE:

Nutzen Sie ein Desinfektionstuch, um die Linse und die Außenhülle der Optiken zu reinigen. Sämtliche weiteren Aufsätze sowie die Greifer sind für den Autoklaven geeignet.

REINIGUNG DES HAUPTGERÄTS:


Zur Reinigung des Hauptgeräts kann ein mit Wasser, Alkohol oder einem nicht färbenden Desinfektionsmittel getränktes Tuch verwendet werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten an die elektronische Schnittstelle oder in die USB-C-Anschlüsse gelangen.

ANLEITUNG



AN/AUS

2 sek gedrückt halten, kurz warten während das Gerät hochfährt (nicht zu fest drücken)

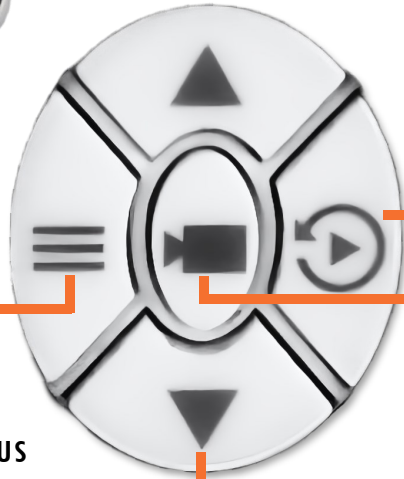

WIEDERGABETASTE

- Fotos und Videos wiedergeben
- Zum Löschen von Aufnahmen, Kamertaste 1x kurz betätigen

MENÜ

- Video-Modus
- Kamera-Modus
- Wiedergabe
- Einstellungen (Datum, Zeit, Sprache, SD-Karte formatieren)

Mit **PFEILTASTEN** navigieren, mit Kamertaste bestätigen

KAMERATASTE

FOTOS:

- Foto aufnehmen: 1x kurz betätigen
- Speichern: 3 sek gedrückt halten
- Foto verwerfen: 1x kurz betätigen

VIDEOS:

- Video aufnehmen: 3 sek gedrückt halten, Aufnahme startet (Kamerasymbol blinkt) 1x kurz drücken, um Aufnahme zu stoppen
- Video wird automatisch gespeichert



AUFLADEN

Stellen Sie das Gerät in die Ladestation. Verbinden Sie das Netzteil mit dem USB-Kabel und stecken dieses in den USB-C Anschluss an der Ladestation.



DATENÜBERTRAGUNG

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-C Anschluss an dem Hauptgerät und dem USB-Eingang des Computers.

Auch dieser Anschluss kann zum Aufladen genutzt werden.



EINRICHTEN DES GERÄTS



Richten Sie die Optik so aus, dass die Nase in die Führung passt.



Drehen Sie die Optik im Uhrzeigersinn, bis sie bündig sitzt.



Nun können auch weitere Aufsätze auf die Optik gesteckt werden.



Verfahren Sie mit den weiteren Optiken und Aufsätzen auf dieselbe Weise.



Nutzen Sie die 8cm Optik, um den großen Arbeitskanal + Greifer zu verwenden.



Nutzen Sie die 8cm Optik, um den großen Ohrtrichter zu verwenden.



Nutzen Sie die dünne 1,8mm Optik, um den kleinen Arbeitskanal + Greifer zu verwenden.

Vor dem Wechsel der einzelnen Optiken sollte das Gerät ausgeschaltet werden.

⚠ WICHTIGE HINWEISE: VOR GEBRAUCH LESEN

- Das Gerät darf nur unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart von brennbaren Chemikalien.
- Die elektronischen Kontaktflächen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Hochfrequente drahtlose Kommunikationsgeräte können die Leistung des Gerätes beeinflussen.
- Wenn das Gerät sehr lange eingeschaltet ist, kann sich die Spitze durch das Licht leicht erwärmen. Sofern dies für den Patienten unangenehm sein sollte, schalten Sie das Gerät kurz ab und setzen Sie die Untersuchung erst fort, wenn es abgekühlt ist.
- Modifikationen an diesem Gerät sind nicht gestattet.



Videobeispiele & weitere Infos finden Sie auf unserer Website:

www.mltec-laser.com



MLTec
Medizinische Laser Technologie

66, Grand-Rue
L-6630 Wasserbillig
E-Mail: info@mltec-laser.com